

シュアロックヘッドレスト取扱説明書

IMPROVED
DESIGN



昭和貿易株式会社ヘルスケア営業部


大阪：大阪市西区江戸堀1-18-27

東京：東京都中央区日本橋本町4-13-5第20中央ビル8F

TEL:06-6441-5612 FAX:06-6444-6006

TEL:03-5623-5396 FAX:03-5623-5398

1. 部品構成

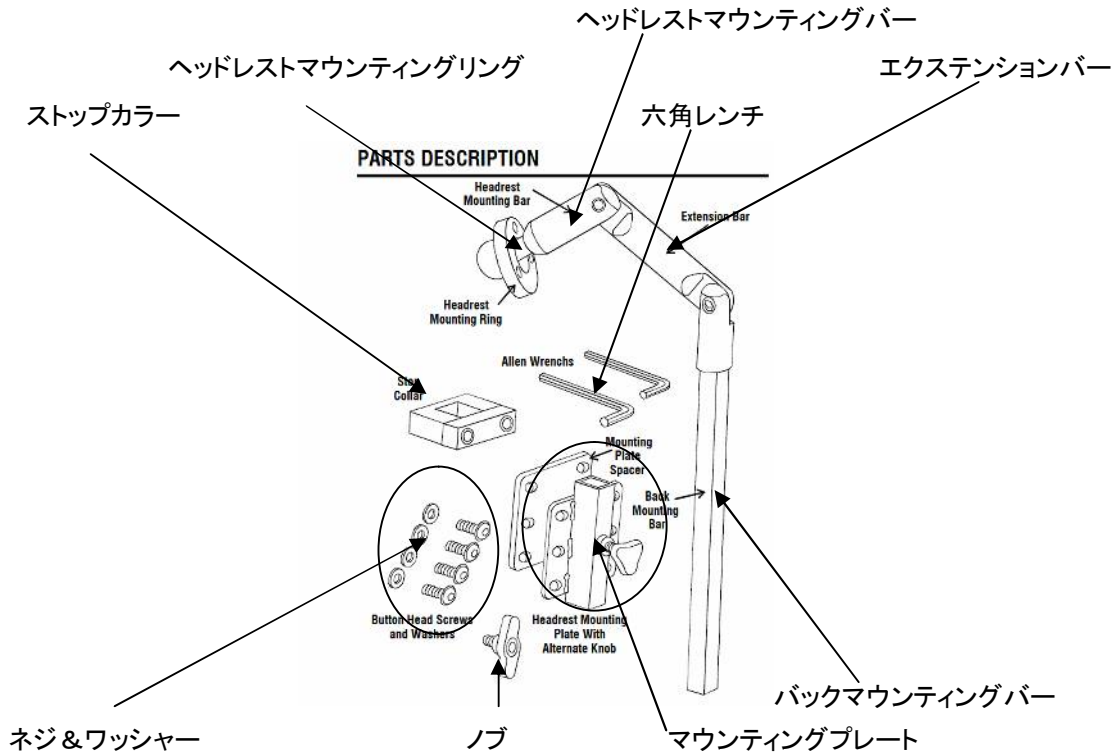


2. 取付方法


1) マウンティングプレートを背板に固定します。

ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS


1. Use 4 buttonhead screws and washers (included) to attach **mounting plate and spacer** to chair. Make sure all six holes of plate and spacer line up. The on-center hole dimensions of the **mounting plate** are shown here.

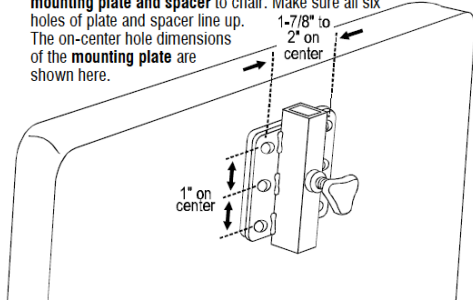


2) バックマウンティングバーにストップカラーを固定し、高さの位置調節をします。

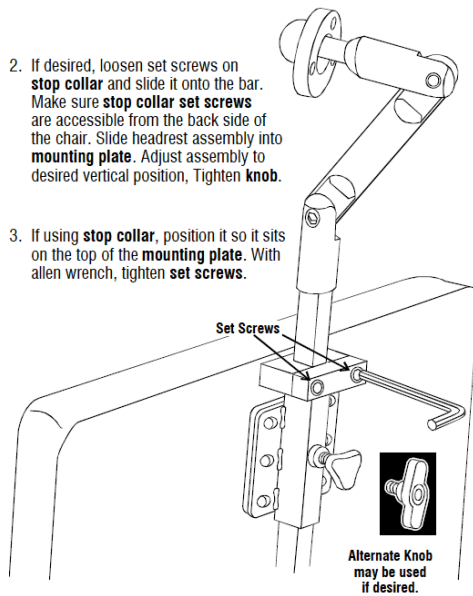

3) パッド位置の前後調節が必要であれば、イクステンションバーを連結します(図右)。イクステンションバーをはずすと、角度調節のみのシンプルな構造になります(図左)

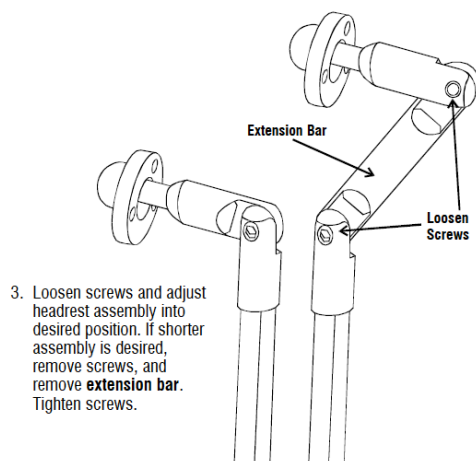

- 4)ヘッドレストマウンティングリングとボルトでパッドを取り付けます。

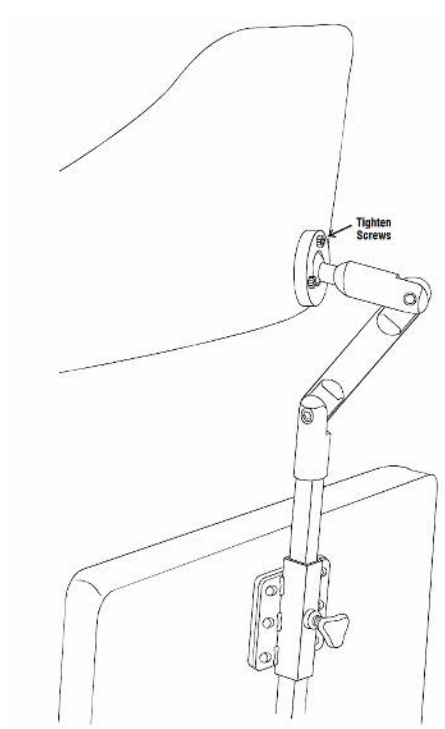

3. 使用上の注意

- 1)ボルトやネジが緩んでいる場合は、そのまま使用せず締め直してご使用ください。
- 2)ボルトやネジがなくなった場合は、そのまま使用せず販売店にご連絡ください。