

スポークカバー商品概要

ヘインリッチ社は 車椅子用スポークカバー専門メーカーとして ドイツを中心にヨーロッパ各国で長年 製造～販売に携わってきました。このスポークカバーは 耐衝撃性プラスチックにデジタルプリントされたデザイン画で構成され 自社工場で一貫生産しています。

商品は **8つのカテゴリーと約280枚以上のデザイン画**から構成されており 当社ホームページで見ることが出来ます。カタログはありません。8つのカテゴリーは下記の通りです。

①子供 ②抽象画 ③多彩画 ④マンダラ模様 ⑤宇宙 ⑥レース ⑦自然 ⑧動物

商品の詳細

1. 商品番号について

1)発注に必要なデザイン画の商品番号は 下記の①～④の作業を実施することで見つけることが出来ます。

- ①スポークカバーのホームページを開き 画面下部の8つのカテゴリー別デザイン画の中から 希望するカテゴリー画をクリックする。
- ②1つのカテゴリーに入っているデザイン画が一覧できます。
- ③その一覧のデザイン画から 1つだけを選択し クリックすると拡大されたデザイン画が現れます。
- ④拡大されたデザイン画の下部に 商品番号が表示されています。




商品番号-2072

2. 適用車輪

1)対象となる車輪は **16・20・22・24インチの4種類** となります。お好みの外輪径で スポークカバーを作ることも出来ます。 * 26インチが必要な場合 販売店にご相談ください。


3. スポークカバーの内輪径

- 1)車軸の着脱のために 商品の中心部に穴(内輪)を空けます。
- 2)商品の内輪径は **14cm と 内輪無し と 内輪径希望寸法**の3種類から選択してください。
但し **クイックリリースの車軸をご使用の場合 内輪径が小さすぎると 着脱の際 指が入りにくく着脱がやり難くなります。**
参考として ドイツでは14cm内輪径が標準サイズとなっています。

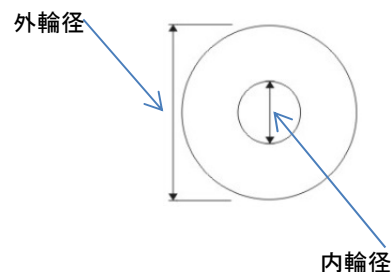


4. ハンドリム支柱数

- 1)スポークカバーを取付けるとき ハンドリムの支柱が邪魔にならないように外輪部(下の図参照)にカットを入れ くぼみの加工をします。
- 2)ハンドリムを車輪に固定するために支柱が付いています。メーカーによって異なりますが 基本的には **支柱の数は 4・5・6本のいずれか**となりますので 適用するものを選択ください。
- 3)ハンドリムを車輪に取付けず スポークカバーのみを装着する場合 **支柱無し** を選択してください。支柱避けカット部分が無い丸い状態の商品となります。

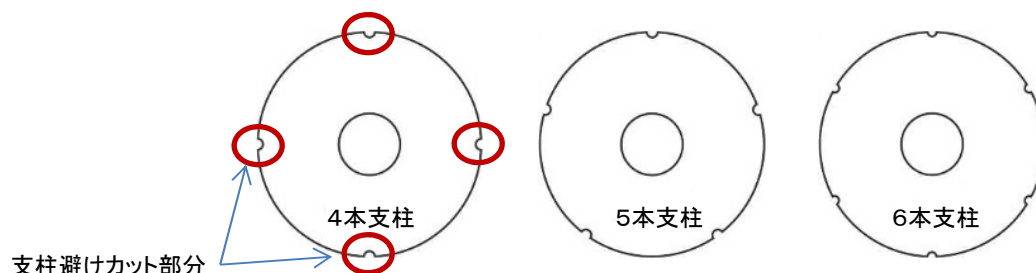


5. 取付方法

- 1) 商品を車輪に取付ける場合 標準で7・5・3穴と穴無しから選択できます。スポーク数により必要な穴数が違います。
- 2) 取付方法は 2つの方法で取付けます。1つはクリップ式、もう一つは結束バンド式(インシュロック)です。お好みに合わせて選択下さい。
- 3) 6本スポークのマグホイールの車輪の場合でも 結束バンド式を使えば取付けることができます。
但し 形状によっては取付けられない場合もあります。

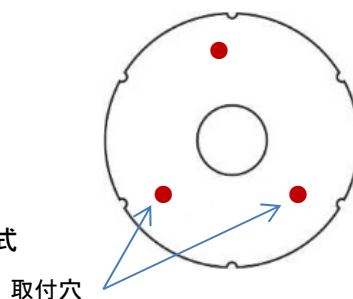

* この資料と並行して スポークカバーのホームページにある「注文書」をご参照下さい。

(クリップ式)

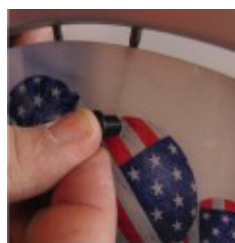

6. 仕様

適用車輪	16インチ	20インチ	22インチ	24インチ
スポークカバーの外輪径	約32cm	約41cm	約46cm	約51cm
	外輪径希望寸法			
スポークカバーの内輪径	14cm ・ 内輪無し ・ 内輪径希望寸法			
ハントリム固定支柱数	4ヶ所 ・ 5ヶ所 ・ 6ヶ所 ・ 支柱無し			
取付方法	クリップ式 ・ 結束バンド式			
取付穴数	7穴 ・ 5穴 ・ 3穴			

昭和貿易株式会社
大阪市西区江戸堀 1-18-27
TEL : 06-6441-5612